

fotel  
masujący

**Rio**

## **Dziękujemy za wybór naszego fotela masującego!**

Przed pierwszym użyciem fotela Rio przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją, aby móc do niej wracać w razie potrzeby. Znajdziesz tu ważne zasady bezpieczeństwa i wskazówki, które sprawią, że korzystanie z fotela będzie wygodne i bezpieczne.

Życzymy wspaniałych chwil w fotelu Rio!

## Spis treści

---

Specyfikacja techniczna .....	4
<b>Co musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz sesję masażu .....</b>	<b>4</b>
1. Kto nie powinien korzystać z tego urządzenia .....	5
2. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .....	5
3. Środki ostrożności .....	6
4. Warunki przechowywania .....	8
<b>Zaczynamy! .....</b>	<b>9</b>
1. Poznaj fotel masujący .....	9
Budowa fotela .....	9
Sterowanie panelem bocznym .....	9
Funkcje pilota .....	10
Ekran pilota .....	11
2. Przygotowanie fotela do uruchomienia .....	12
Przemieszczanie fotela .....	12
Ustawienie fotela .....	12
Zamki błyskawiczne i kieszonka na pilot .....	13
Uruchamianie zasilania .....	13
3. Jak działa fotel Rio – funkcje krok po kroku .....	14
Czas na masaż! .....	14
Programy automatyczne .....	14
Masaż manualny – techniki i ustawienia .....	14
Ustawienia ogólne .....	15
<b>Czyszczenie i konserwacja fotela masującego .....</b>	<b>16</b>
<b>Diagnoza usterek .....</b>	<b>17</b>
<b>Informacje dotyczące utylizacji .....</b>	<b>18</b>
<b>Warunki gwarancji .....</b>	<b>19</b>

## Specyfikacja techniczna

---

Nazwa urządzenia	Fotel masujący Nedo Rio
Model urządzenia	R8662
Moc (W)	110 W
Napięcie (V)	100-240 V
Natężenie (A)	DC 7.4V, 2200mAh
Częstotliwość	50-60 Hz

## Co musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz sesję masażu

---



**OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj wszystkie informacje/ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje montażu, obsługi i konserwacji, ilustracje i specyfikacje dołączone do urządzenia. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować poważne narażenie zdrowia, a nawet życia i/lub porażenie prądem elektrycznym czy pożar. Przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, nawet jeśli uważasz, że urządzenie jest Ci dobrze znane. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

## 1. Kto nie powinien korzystać z tego urządzenia

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, zaburzeniami sensorycznymi lub neurologicznymi lub osoby, które nie mają doświadczenia lub mają zaburzenia psychiczne – chyba że są nadzorowane i poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeżeli:

- cierpisz na cukrzycę, osteoporozę,
- cierpisz na choroby serca lub masz wszczone elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca,
- jesteś w ciąży,
- masz problemy ze stawami,
- masz zapalenie żył, zakrzepicę lub zwiększone ryzyko powstawania skrzepów we krwi,
- masz urazy lub choroby skóry,
- masz kontuzje kręgosłupa lub przebyty uraz kręgosłupa,
- niedawno poddano Cię operacji,
- masz wszczone implanty,
- lekarz zalecił Ci odpoczynek.

## 2. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze odłączaj fotel od zasilania po użyciu.
- Urządzenie nie powinno pozostawać podłączone do prądu bez nadzoru. Odłączaj fotel od zasilania także podczas czyszczenia oraz demontażu.
- Nie przykrywaj się kocem, gdy korzystasz z urządzenia – nadmierne nagrzewanie się fotela mogłoby spowodować pożar, porażenie prądem i zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci lub osoby z niepełnosprawnościami, zachowaj nad nimi ścisły nadzór.
- Obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Nigdy nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wymienione w tej instrukcji.
- Nie używaj żadnych części ani akcesoriów, które nie są zalecane.
- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz pomieszczeń. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego (do użytku w pomieszczeniach).
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli konstrukcja, powłoka lub przewód są uszkodzone,

- jeśli urządzenie zostało zalane cieczą lub jeśli zauważysz, że działa nieprawidłowo.
- Nie upuszczaj żadnych przedmiotów do wnętrza tego urządzenia.
  - Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od zasilania przed próbą jego przemieszczenia. Nie ciągnij za kabel w celu przemieszczenia fotela ani żadnym innym.
  - W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
  - Nie skręcaj, nie załamuj ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie i pęknięcie izolacji.
  - Nie umieszczaj przewodu na podgrzanej powierzchni, pod wykładziną, dywanami lub chodnikami.
  - Zwróć uwagę, aby otwory wentylacyjne w urządzeniu nie były niczym przykryte.
  - Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
  - Podłączaj urządzenie do gniazdek elektrycznych, które posiadają uziemienie. Jeśli nie masz pewności, czy gniazdko elektryczne jest odpowiednie, skonsultuj się ze specjalistą.
  - Nie używaj urządzenia ze zwiniętym przewodem, ponieważ nagromadzone ciepło może stanowić zagrożenie.
  - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu promieniujących źródeł ciepła, w pobliżu rozpylanych aerozoli i skoncentrowanego tlenu.
  - Aby poprawnie wyłączyć urządzenie, najpierw wyłącz je przyciskiem z tyłu fotela, następnie odłącz wtyczkę od zasilania.
  - Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta na przewód o takich samych parametrach.
  - Nie skręcaj, nie załamuj ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie i pęknięcie izolacji.
  - Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach nadmiernie wilgotnych, w temperaturze powyżej 40 stopni Celsjusza ani w bezpośrednim pobliżu grzejników.
  - Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### 3. Środki ostrożności

- Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne ze specyfikacją techniczną tego urządzenia.
- Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj przewodu mokrymi rękami.
- Uważaj, aby włosy i biżuteria nie dostały się pomiędzy mechanizmy masujące fotela.

- Nie dopuść do przedostania się wody do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie uszkadzaj przewodów ani nie modyfikuj obwodów urządzenia.
- Nie czyść części urządzenia znajdujących się pod napięciem, takich jak włącznik zasilania i wtyczka, wilgotną szmatką.
- W przypadku awarii zasilania oddal się od urządzenia, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego przywrócenia zasilania.
- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia natychmiast przerwij jego użytkowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- W przypadku złego samopoczucia przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie wyjmuj przewodu z gniazda, dopóki urządzenie nie zostanie wyłączone.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Każde inne użycie nie jest zalecane przez producenta i może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie używaj tego urządzenia z żadnym zewnętrznym programatorem, wyłącznikiem czasowym lub innym urządzeniem, które włącza je automatycznie.
- Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, a obudowa nie powinna być otwierana przez nikogo innego niż wykwalifikowany serwis.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź urządzenie i zapoznaj się z instrukcją.
- Jeśli fotel masujący stał w zimnym pomieszczeniu, nie podnoś temperatury w pomieszczeniu gwałtownie. Jeżeli przenosisz fotel z zimnego pomieszczenia do ciepłego, przed uruchomieniem go poczekaj godzinę.
- Nie używaj fotela masującego po zdjęciu tapicerki z siedzenia. Mogłoby to spowodować uraz lub uszkodzenie fotela.
- Nie używaj fotela masującego jednocześnie z innymi urządzeniami, takimi jak koc elektryczny – może to zmniejszyć efektywność masażu lub spowodować uraz.
- Nie siadaj ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłokietnikach i oparciu fotela.
- Nie wkładaj dłoni ani stóp pomiędzy mechanizmy masujące w fotelu – mogłoby to spowodować uraz.
- Przerwij sesję masażu natychmiast, jeśli poczujesz ból lub dyskomfort.
- Dla bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem sesji masażu zdejmij biżuterię i luźne części odzieży, takie jak szalik czy apaszka.

- Nie korzystaj z masażu w fotelu bezpośrednio po posiłku.
- Zaleca się korzystanie z masażu nie dłużej niż 30 minut jednorazowo, w tym nie dłużej niż 5 minut na pojedynczą partię ciała – zbyt długa stymulacja mogłaby spowodować skutki odwrotne niż oczekiwane.

**Pamiętaj, że fotel masujący nie jest urządzeniem medycznym.**

Jeśli wystąpi któraś z następujących sytuacji, natychmiast wyłącz fotel głównym przyciskiem zasilania i odłącz go od prądu:

- jeśli przypadkiem coś rozlejesz na fotel – ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia fotela;
- jeśli tapicerka zostanie uszkodzona na tyle, że komponenty wewnątrz fotela staną się widoczne,
- jeśli stwierdzisz, że mechanizm fotela zachowuje się dziwnie,
- w przypadku awarii prądu – ryzyko porażenia prądem w razie gwałtownego przywrócenia zasilania,
- w przypadku pożaru w pobliżu.

#### **4. Warunki przechowywania**


- Temperatura przechowywania: od 5°C do 40°C.
- Pomieszczenie wolne od gazów korozyjnych i dobrze wentylowane.
- Urządzenie i jego przewód przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

## Zaczynamy!

Fotel masujący Rio stanie się Twoim towarzyszem codziennego dnia, da wytchnienie zmęczonym mięśniom i zapewni Ci chwilę tylko dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nie jest to sprzęt medyczny. Jeżeli odczuwasz uporczywe dolegliwości zdrowotne, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

### 1. Poznaj fotel masujący

#### Budowa fotela

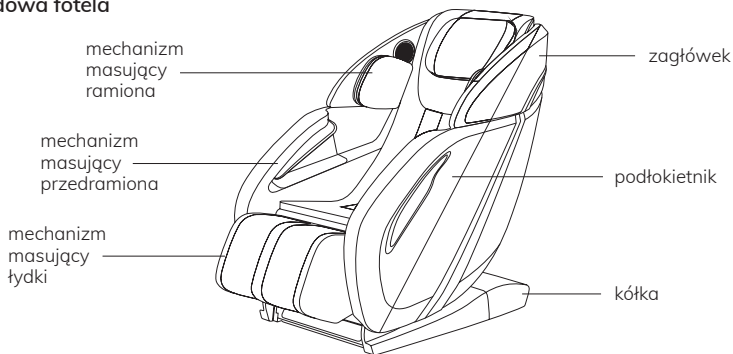

#### Sterowanie w panelu bocznym

Po lewej stronie wewnątrz fotela znajduje się panel szybkiego sterowania, którym możesz ustawić pozycję ciała (opuścić i podnosić oparcie fotela), włączyć program automatyczny masażu, wstrzymać i uruchamiać program oraz wyłączyć fotel.



**WŁĄCZNIK:** Włącz/wyłącz fotel.



**PAUZA:** Zatrzymuje program masażu. Przyciśnij ponownie, aby uruchomić go z powrotem.



**AUTO:** Uruchamia program automatyczny masażu. Do wyboru 6 programów automatycznych.




**DO TYŁU:** Obniż pozycję pleców. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać obniżanie się fotela i zatrzymać się w pożądanej pozycji.



**DO GÓRY:** Wróć do pozycji siedzącej. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać powrót fotela i zatrzymać się w pożądanej pozycji.

## Pilot

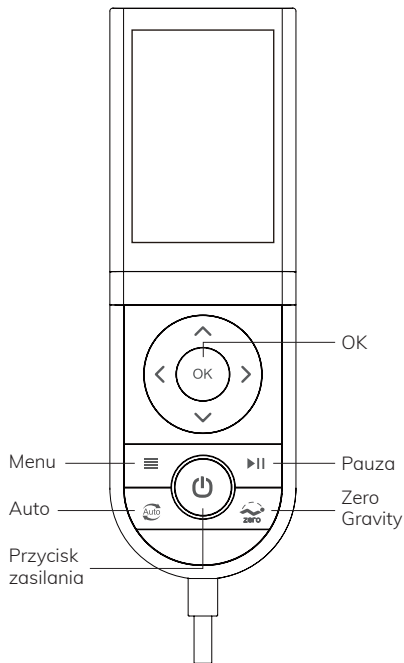**Włącz/wyłącz:**

Po podłączeniu do zasilania, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić fotel masujący. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć fotel.

**Pauza:**

Wstrzymuje masaż. Naciśnij ten przycisk ponownie, żeby go uruchomić.

**Menu:**

Podgląd listy funkcji.

**Kierunki i OK:**

Steruj i wybierz odpowiednie ustawienia, potwierdź przyciskiem OK.

**Zero Gravity:**

Przejdź do pozycji Zero Gravity.

**Auto:**

Wybieraj pomiędzy 6 programami automatycznymi.



**Parowanie Bluetooth:**

Podczas parowania Bluetooth, wybierz urządzenie o nazwie R8862. Dźwięk „du” oznacza to, że fotel został pomyślnie sparowany.

**Środki bezpieczeństwa**

- Nie siadaj, nie nadeptuj na pilot i nic na nim nie kładź.
- Nie upuszczaj pilota. Postaraj się zawsze odkładać go do kieszonki z boku fotela.
- Nie używaj pilota z nadmierną siłą.
- Nie obsługuj pilota mokrymi dłońmi.
- Nie obsługuj pilota niczym o ostrych krawędziach.


## Ekran pilota

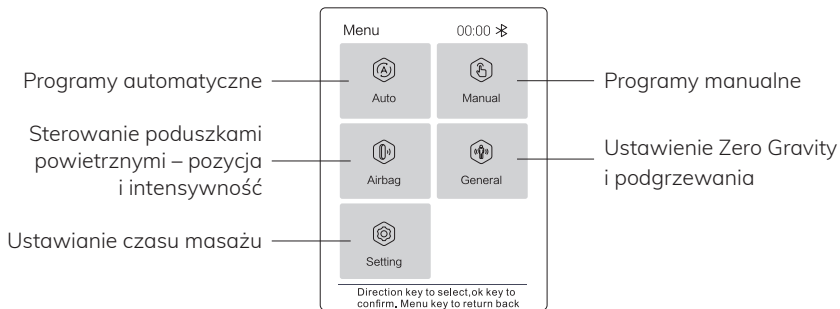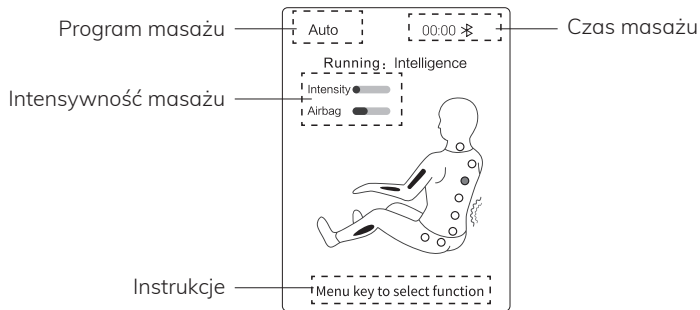

## 2. Przygotowanie fotela do uruchomienia


### Przemieszczanie fotela

- Wyłącz fotel i odłącz go od zasilania.
- Pochyl fotel do tyłu, tak jak na obrazku poniżej, i przesuń w żądane miejsce.
- Podczas przesuwania fotela zabezpiecz podłogę, aby jej nie zniszczyć.

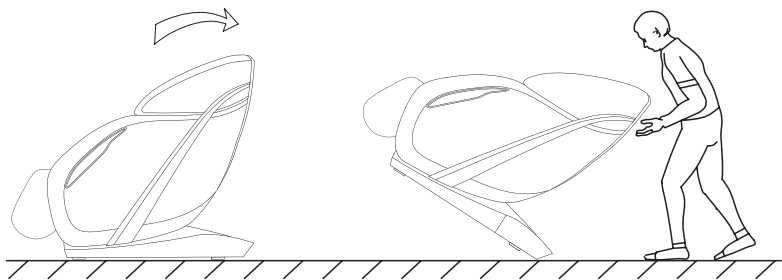

### Ustawienie fotela

Upewnij się, że z tyłu fotela jest co najmniej 10 cm odległości od ściany oraz co najmniej 40 cm z przodu.

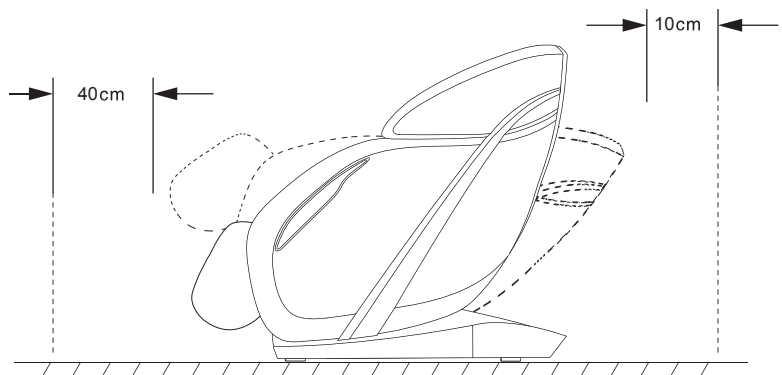


## Zamki błyskawiczne i kieszonka na pilot

Po rozpakowaniu fotela z kartonu dopnij zamki błyskawiczne, które znajdują się:

- pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem (mechanizmem masującym łydki),
- nad zagłówkiem,
- po obydwu stronach oparcia, po wewnętrznej stronie.


Zapięcie zamków uchroni mechanizm fotela masującego przed przedostaniem się do niego kurzu i innych zanieczyszczeń z otoczenia.

Kieszonkę na pilot zamocuj po prawej stronie fotela na wysokości podłokietnika, mocując jej uchwyt na rzep znajdujący się po wewnętrznej stronie obudowy fotela.

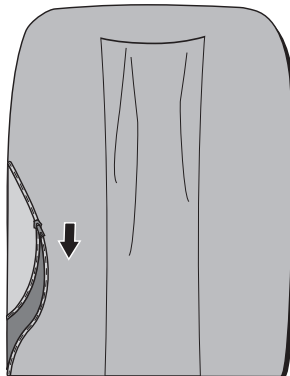

## Uruchamianie zasilania

Podłącz przewód do gniazda zasilania w fotelu, następnie przełącz przycisk.

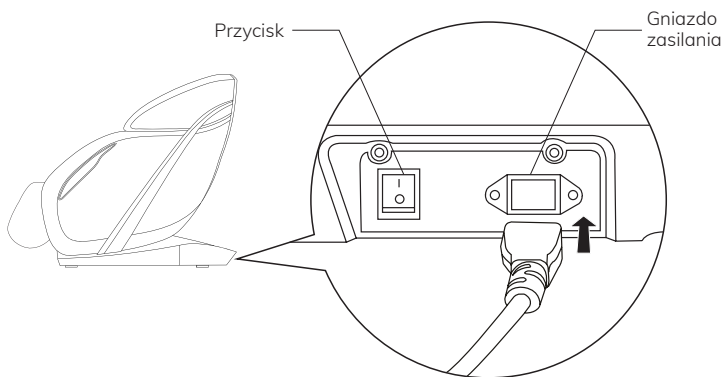

### 3. Jak działa fotel Rio – funkcje krok po kroku

#### Czas na masaż!

1. Włącz fotel – automatycznie przejdzie do pozycji Zero Gravity.
2. Fotel dopasuje się do Twojej sylwetki.
3. Automatyczny start – uruchomi się program Classical/Master (20 min).

#### Czas na masaż!

Master – intensywny masaż całego ciała

Relaxing – delikatny, odprężający masaż

Soft – lekki masaż relaksacyjny

Sleep – komfortowy masaż uspokajający

Waist & Back – skupiony na plecach i talii

Neck & Shoulder – redukcja napięcia w szyi i ramionach

#### Masaż manualny – techniki i ustawienia

- partię ciała, którą chcesz masować (Part): całe ciało (Whole), krótki odcinek (Partial) lub dany punkt (Point);
- szerokość ramion (Width): szeroko rozstawione (Widest), średnio (Middle) lub wąsko (Narrow);
- intensywność masażu (Intensity): od poziomu 1 (najdelikatniejszy) do poziomu 6 (najmocniejszy).

Możesz wybrać masaż samymi poduszkami powietrznymi (Airbag). W takim programie masz możliwość samodzielnego wyboru partii ciała (Part): całe ciało (Whole), ramiona (Shoulder), talia (Waist), ramiona (Arm), łydki (Leg) oraz intensywności masażu (Intensity): od poziomu 1 (najdelikatniejszy) do poziomu 3 (najmocniejszy).

Co możesz ustawić w poszczególnych programach manualnych:

	Kneading	Tapping	Knocking	Clapping	Shiatsu	Scrapping	Airbag
Wybór partii ciała	TAK	TAK	TAK	TAK	całościowy lub odcinkowy	TAK	TAK
Intensywność	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Rozstaw rolek	NIE	TAK	szeroki i średni	TAK	TAK	TAK	NIE

### Ustawienia ogólne (Setting)

W menu ustawień ogólnych masz możliwość wyboru:

- ustawienia wygodnej pozycji ciała w pozycji Zero Gravity – 3 pozycje do wyboru. Im głębiej (niżej) leżysz, tym masaż będzie odczuwalnie bardziej intensywny;
- włączenia ogrzewania lędźwi (Heating);
- ustawienia ciała w danym położeniu (Angle adjustment):
  - back down – przycisk należy przytrzymać dłużej. Oparcie przesunie się w tył (w dół), a łydki do góry,
  - back up – oparcie pleców przesunie się do przodu (do góry), a łydki w dół.
- czas trwania masażu (Time) od 10 minut do 30 minut co 5 minut;
- Bluetooth – wbudowane głośniki pozwalają na odtwarzanie ulubionej relaksującej muzyki z telefonu, posłuchanie audiobooka lub podcastu.

## Czyszczenie i konserwacja

---

- Przed rozpoczęciem czyszczenia fotela, koniecznie odłącz go od zasilania.
- Fotel czyść szmatką nasączoną wodą z delikatnym środkiem czyszczącym. Wycieraj nią tapicerkę i plastikowe elementy, a następnie pozostaw do wyschnięcia.
- Nie używaj benzyny, żrących środków czyszczących ani wybielaczy do czyszczenia fotela.
- Nie osuszaj fotela suszarką, nie prasuj tapicerki, nie odłączaj przewodu mokrymi dłońmi.
- Jeśli nie będziesz używać fotela przed dłuższy czas, nałóż na niego pokrowiec.
- Fotel powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis wyznaczony przez producenta. Nie demontuj i nie serwisuj fotela samodzielnie.
- Jeśli fotel nie był używany przez dłuższy czas, przed ponownym włączeniem sprawdź, czy nie dzieje się coś niepokojącego, np. wyczuwalny zapach spalenizny, przewody nie działają lub działają niestabilnie, kabel zasilający mocno się nagrzewa, widać uszkodzenia przewodów. Jeśli zauważysz coś z powyższej listy, natychmiast przestań korzystać z urządzenia! Wyłącz je, odłącz od prądu i nie próbuj naprawiać samodzielnie – skontaktuj się z naszym serwisem.

## Diagnoza usterek

---

- Jeśli fotel nie działa poprawnie, sprawdź, czy występuje któraś z poniższych usterek.
- Jeżeli problemu nie da się rozwiązać — odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z naszym serwisem.
- Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie!

## Rozwiązania typowych usterek:

## Problem

## Możliwe rozwiązanie

Rolki masujące przesuwają się do góry, a następnie się zatrzymują.



Automatyczny timer powoduje, że gdy program masażu dobiega końca, rolki masujące przesuwają się do góry i zatrzymują.

Fotel wydaje dźwięki podczas masowania



Dla fotela masującego normalne są: dźwięk oklepywania i ostukiwania, dźwięk wzajemnego tarcia materiału i mechanizmu masującego, napełniania się i opróżniania poduszek powietrznych, a także opuszczania się i podnoszenia oparcia.

Rolki masujące zatrzymują się w trakcie trwania programu.



Rolki zatrzymują się, jeśli aplikowana jest na nie zbyt duża siła. Unieś lekko ciało. Może się to zdarzyć zwłaszcza, jeśli waga użytkownika przekracza 100 kg.

Fotel masujący nie włącza się.



Sprawdź, czy przewody są poprawnie podłączone i czy przetątnik z lewej strony na dole z tyłu fotela jest w pozycji uruchomienia.

Przewód i wtyczka są gorące.



Natychmiast przerwij korzystanie z fotela i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

To normalne zachowanie fotela.

Jeśli po ponownym sprawdzeniu stwierdzisz, że problem wciąż występuje, bezwzględnie przerwij korzystanie z fotela.

## Informacje dotyczące utylizacji

---

Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłych nieposortowanych odpadów komunalnych.

Stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu zawartych w nich materiałów oraz zmniejszenia wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.



Przekreślony symbol „kołowego kontenera na odpady” na urządzeniu przypomina o obowiązku selektywnej zbiórki zużytych urządzeń. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji starego urządzenia.

## Warunki gwarancji

---

1. Gwarancji udzielamy na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Okres gwarancji zmniejsza się do 12 miesięcy w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady rozpatrujemy i usuwamy w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia wady.
3. W przypadku, gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy.
4. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji realizujemy na podstawie dowodu zakupu.
5. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy nabywcy,
  - c. uszkodzeń spowodowanych na skutek naprawy lub modyfikacji dokonanych przez osoby nieupoważnione przez sprzedawcę,
  - d. zwykłego eksploatacyjnego zużycia,
  - e. przypadków losowych, uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji, takich jak powódź czy pożar.
6. Do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji nabywca powinien dostarczyć sprzęt objęty gwarancją do miejsca zakupu urządzenia.
7. Koszty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy ponosi nabywca.
8. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeśli wynika on z niewłaściwego posługiwania się urządzeniem.



**Producent:**

Fujian Rovos Fitness Co., LTD.  
XibeiYang Industrial Zone, Fuan, Fujian, China

**Importer:**

Svea Polska Sp. z o.o., Kartuska 370, 80-125 Gdańsk, Polska  
[www.nedo24.pl](http://www.nedo24.pl)